

Dott. Ing. Mauro Massari

Cod.fisc. MSSMRA52R10D899P

Email info@studiotecnicomassari.it


massari
F.lli M. e G. Massari - studiotecnico

ITALIANO IT- ISTRUZIONI PER L'USO

SALUTE E VITA, FACCIALI FILTRANTI CON ELASTICI REGOLABILI EN 149 **FABBRICATI IN ITALIA** da Franca Scampoli Snc, San Mauro Pascoli (FC).

DESCRIZIONE

- 1) I facciali filtranti Salute e Vita, sono conformi agli standard della normativa EN 149:2001 + A1 :2009, che proteggono da "condizioni atmosferiche di natura non estrema".
- 2) E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il facciale filtrante fornisca l'adeguato livello di protezione contro il tipo e la concentrazione dei contaminanti nell'ambiente dove deve essere utilizzato.
- 3) Il tessuto è in polipropilene tagliato in FACCIALI FILTRANTI con elastici regolabili.
- 4) Permette di trattenere aria non solo negli spazi tra le fibre, ma anche al loro interno, aumentando il potere isolante.
- 5) Facciale filtrante **FF P1** con bassa separazione contro le particelle solide (efficienza filtrante minima 78%)
- 6) Non si tratta di Presidio Medico.
- 7) Prodotto non importato.

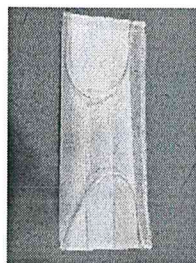

Facciale filtrante



Confezione

AVVERTENZE.

- I) L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del dispositivo prima dell'impiego.
- II) E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il Facciale filtrante favorisca un adeguato livello di protezione.
- III) Non modificare o alterare il Facciale filtrante
- IV) I Facciali filtranti non possono essere riutilizzati, ma possono essere lavati con detersivo naturale e disinfettati.
- V) Il facciale filtrante non protegge da gas e vapori per i quali è necessario l'impiego di dispositivi adeguati.
- VI) Non usare in ambiente con insufficiente contenuto di ossigeno (< 17%).

ISTRUZIONI PER INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE.

- 1) Impugnare il dispositivo con il palmo della mano, mantenendo gli elastici esterni.
- 2) Posizionare gli elastici dietro le orecchie.